

GUIA DE INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

1-DAY ACUVUE DEFINE®

(etafilcon A)

Com Bloqueador UV

Uso Diário

Fabricado por: JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. - 7500 CENTURION PARKWAY - JACKSONVILLE, FLORIDA 32256 – EUA

JOHNSON & JOHNSON VISION CARE (IRELAND) - THE NATIONAL TECHNOLOGY PARK - LIMERICK-IRLANDA

Importado por: Johnson & Johnson Industrial Ltda.

Rod. Presidente Dutra, km 154 - S.J. dos Campos – SP C.N.P.J. 59.748.988/0001-14

Reg. ANVISA Nº 80148620059

Resp. Téc.: Lilian Cristina Menegon de Castro Moreira CRF-SP No.22777

© Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda - 2015.

Validade (ano / mês) e Lote: vide lateral da embalagem.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA REFRACTIONAL
CONSULTE REGULARMENTE SEU OFTALMOLOGISTA.

Estéril: produto esterilizado por vapor.

Conteúdo: lentes de contato (42% de etafilcon A e 58% de água)

Quantidade: vide embalagem do produto

ARMAZENAR O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL À TEMPERATURA AMBIENTE.

DESTRUIR APÓS O USO RECOMENDADO.

Serviço ao Consumidor 0800-762-5424

www.acuvue.com.br

INTRODUÇÃO

Sobre esta instrução de uso:

As informações e instruções contidas neste manual aplicam-se apenas para as lentes de contato da marca

1-DAY ACUVUE DEFINE® com tecnologia LACREON®.

Para a saúde dos seus olhos, é importante que suas lentes de contato sejam usadas apenas conforme instruções de uso do produto e com os cuidados extras recomendados pelo seu oftalmologista. Ele deverá estar totalmente informado de seu histórico médico e desenvolverá um programa completo de cuidados com base em suas necessidades específicas.

Sobre suas lentes e uso da lente de contato :

Suas lentes de contato foram feitas a partir de um material hidrofílico que tem a capacidade de absorver água, tornando-as macias e flexíveis. As lentes receberam um tratamento para melhorar a visibilidade para manuseio; além disso, contêm um elemento de absorção da radiação ultravioleta (UV) com o objetivo de bloqueá-la.

As lentes de contato da marca 1-DAY ACUVUE DEFINE® são destinadas para correção de miopia e hipermetropia e também para melhorar ou alterar a aparência do seu olho natural.

As lentes de contato 1-DAY ACUVUE DEFINE® são fabricadas nos seguintes padrões / estilos:

- 1-DAY ACUVUE DEFINE® WITH LACREON® ACCENT STYLE
- 1-DAY ACUVUE DEFINE® WITH LACREON® NATURAL SHINE
- 1-DAY ACUVUE DEFINE® WITH LACREON® VIVID STYLE
- 1-DAY ACUVUE DEFINE® WITH LACREON® NATURAL SHIMMER
- 1-DAY ACUVUE DEFINE® WITH LACREON® NATURAL SPARKLE

Verifique quais destes padrões estão disponíveis no país.

Para pacientes que relataram ter sentido desconforto associado a alergias durante o uso de lentes de contato, pesquisas clínicas demonstraram que com o uso único e descarte diário essas lentes podem oferecer mais conforto para 02 entre 03 destes pacientes.

INDICAÇÕES (USOS) E RESTRIÇÕES DE USO

As lentes de contato 1-DAY ACUVUE DEFINE® são indicadas para uso único e descarte diário para a correção de miopia (dificuldade para enxergar de longe) e de hipermetropia (dificuldade para enxergar de perto) em pessoas com olhos sem qualquer doença que possam ter 1,00 D ou menos de astigmatismo.

As lentes de contato da marca 1-DAY ACUVUE DEFINE® contêm um bloqueador UV que ajuda na proteção da transmissão de radiação UV nociva à córnea e ao interior dos olhos.

ALERTA: LENTES DE CONTATO QUE ABSORVEM A RADIAÇÃO UV não substituem o uso de outros métodos de proteção para os olhos que absorva a radiação UV, como óculos de proteção ou óculos de sol, pois elas não cobrem totalmente os olhos e as áreas ao redor deles. Você deve continuar usando proteção com absorção de radiação UV para os olhos.

NOTA: A exposição prolongada à radiação UV é um dos fatores de risco associados ao desenvolvimento da catarata. A exposição baseia-se em vários fatores, como condições ambientais (altitude, geografia, céu nublado) e fatores pessoais (duração e natureza das atividades ao ar livre). As lentes de contato com bloqueador UV auxiliam na proteção contra os danos causados pela radiação UV. Entretanto, estudos clínicos não foram ainda realizados para demonstrar que o uso de lentes de contato com bloqueador UV reduz o risco de desenvolver cataratas ou outras doenças oculares. Consulte seu oftalmologista para mais informações.

Seu oftalmologista determinará como será o uso das lentes de contato (por quanto tempo você deverá usá-las a cada dia). Quando prescritas para uso único e descarte diário, as lentes deverão ser descartadas imediatamente após a remoção, em conformidade com as instruções de uso do produto.

CONTRAINDICAÇÕES (MOTIVOS PARA NÃO USÁ-LAS)

Há determinados problemas de saúde que impedem o uso de lentes de contato. Você deve informar seu oftalmologista sobre qualquer um dos problemas listados a seguir. Somente seu oftalmologista pode determinar se o uso de lentes de contato é apropriado para você.

- Inflamação ou infecção nos olhos ou nas pálpebras ou em torno deles
- Qualquer doença, lesão ou anormalidade nos olhos que afete a córnea, a conjuntiva ou as pálpebras
- Qualquer problema diagnosticado anteriormente que torne o uso de lentes de contato desconfortável
- Olho seco grave
- Sensibilidade corneal reduzida
- Qualquer doença sistêmica que possa afetar os olhos ou piorar com o uso de lentes de contato
- Reações alérgicas na superfície dos olhos ou nos tecidos ao seu redor que possam ser induzidas pelo uso de lentes de contato ou piorar em virtude de seu uso
- Irritação dos olhos causada por reações alérgicas a ingredientes em soluções para lentes de contato (por exemplo, gotas lubrificantes). Estas soluções podem conter produtos químicos ou conservantes (como mercúrio, Timerosal etc.) aos quais algumas pessoas podem desenvolver uma resposta alérgica
- Qualquer infecção ativa nos olhos
- Se os olhos ficarem vermelhos ou irritados

ADVERTÊNCIAS

O que você deve saber sobre o uso de lentes de contato:

PROBLEMAS OCULARES, INCLUINDO ÚLCERAS DE CÓRNEA, PODEM SE DESENVOLVER RAPIDAMENTE E LEVAR À PERDA DA VISÃO.

CASO VOCÊ SINTA:

- Desconforto ocular
- Lacrimejamento excessivo
- Alterações na visão
- Perda de visão
- Vermelhidão nos olhos, ou
- Outros problemas nos olhos

VOCÊ DEVE REMOVER IMEDIATAMENTE AS LENTES DE CONTATO E ENTRAR EM CONTATO COM O SEU OFTAMOLOGISTA.

- Quando prescrito pelo seu oftamologista para uso único e descarte diário (ou seja, o seu oftamologista instrui-lo a remover e descartar suas lentes no final de cada dia de uso em conformidade com as instruções de uso do produto), você não deve usar as lentes durante o sono. Estudos clínicos demonstraram que o risco de problemas oculares graves é aumentado quando as lentes são usadas ao dormir.¹
- Estudos têm mostrado que usuários de lentes de contato que fumam têm uma taxa mais elevada de problemas oculares do que os não fumantes.
- Problemas com lentes de contato ou com produtos para lentes podem resultar em lesões graves para o olho.
- O uso e os cuidados corretos com as lentes de contato e com produtos para lentes são essenciais para a utilização segura deste produto.
- O risco geral de problemas oculares graves podem ser reduzidos ao seguir cuidadosamente as orientações para cuidado das lentes.

Atividade na Água

Instruções de Utilização

Não recomendamos expor suas lentes de contato a água enquanto você as estiver usando.

AVISO:

A água pode conter microorganismos que podem levar a uma infecção grave, à perda de visão ou à cegueira. Se as suas lentes forem submersas em água ao participar em esportes aquáticos ou nadar em piscinas, banheiras, lagos ou oceanos, você deve descartá-las e substituí-las por um novo par.

PRECAUÇÕES

Para a saúde de seus olhos, é importante seguir atentamente as instruções de manuseio, colocação, remoção e uso neste guia, bem como eventuais cuidados extras prescritos por seu oftalmologista (**consulte as seções “Manuseio e colocação de lentes” e “Uso de lentes”**).

Precauções gerais:

- Se você usar lentes de contato para corrigir presbiopia usando monovisão, talvez você não consiga obter a melhor acuidade visual corrigida para visão de perto ou de longe.

¹New England Journal of Medicine, 21 de Setembro, 1989; 321 (12), págs. 773-783.

As necessidades visuais são diferentes para pessoas diferentes, portanto seu oftalmologista deve selecionar junto com você o tipo mais apropriado de lente para suas necessidades.

- **Sempre** entre em contato com seu oftalmologista antes de usar qualquer medicamento em seus olhos.
- **Fique alerta**, pois determinados medicamentos, como anti-histamínicos, descongestionantes, diuréticos, relaxantes musculares, tranquilizantes e aqueles para enjoo de movimento podem causar secura nos olhos, percepção aumentada das lentes (sensação da presença das lentes nos olhos) ou visão borrada. Sempre informe seu oftalmologista se você tiver problemas com suas lentes ao utilizar esses medicamentos. Dependendo dos sintomas, o oftalmologista pode recomendar aplicar gotas umidificantes disponíveis para uso com lentes de contato gelatinosas ou pode recomendar que você pare de usar lentes de contato ao usar esses medicamentos.
- **Fique alerta**, pois usuárias de anticoncepcional oral podem desenvolver mudanças na qualidade visual e no conforto enquanto estiverem usando lentes de contato.
- Como com qualquer lente de contato, consultas de acompanhamento são necessárias para garantir a saúde contínua de seus olhos. Pergunte ao seu oftalmologista sobre o cronograma de acompanhamento recomendado.

Quem deve saber que você está usando lentes de contato:

- **Informe** todos os seus médicos que você usa lentes de contato.
- **Sempre** informe seu empregador que é um usuário de lentes de contato. Algumas atividades podem exigir o uso de equipamento de proteção para os olhos ou podem exigir que você não use lentes de contato.

REAÇÕES ADVERSAS

(REAÇÕES POSSÍVEIS ASSOCIADAS AO USO DE LENTES DE CONTATO)

Possíveis reações:

Esteja ciente que reações podem ocorrer enquanto você estiver usando lentes de contato e podem ou não estar associadas aos seguintes sintomas:

- queimação, físgadas/pontadas e/ou coceira nos olhos
- redução do conforto das lentes de contato
- sensação de algo no olho (corpo estranho, área arranhada)
- inchaço ou inflamação nos olhos ou em torno deles
- vermelhidão nos olhos
- problemas nas pálpebras
- lacrimejamento
- secreções incomuns nos olhos
- redução da qualidade visual
- visão embaçada
- percepção de arco-íris ou halos ao redor de objetos
- sensibilidade à luz (fotofobia)
- ressecamento ocular

Quando qualquer um dos sintomas acima ocorrer, um problema ocular grave pode estar presente. Você deve **procurar imediatamente seu oftalmologista**, para que o problema possa ser identificado e tratado, se necessário, para evitar graves danos aos olhos.

Como reconhecer problemas e o que fazer

Você deve realizar um simples autoexame de três partes pelo menos uma vez por dia.

Pergunte-se:

- Como sinto as lentes nos meus olhos?
- Como está a aparência dos meus olhos?
- Notei alguma alteração na minha visão?

Se notar alterações, você deverá **RETIRAR IMEDIATAMENTE SUAS LENTES**. Se a alteração ou o desconforto cessar, descarte as lentes e coloque um novo par de lentes nos olhos.

Se, depois de colocar as novas lentes, a alteração continuar, **RETIRE IMEDIATAMENTE AS LENTES E ENTRE EM CONTATO COM SEU OFTALMOLOGISTA**.

NÃO use uma lente nova como autotratamento para o problema.

MANUSEIO E COLOCAÇÃO DAS LENTES

Para a saúde de seus olhos, é importante seguir atentamente as instruções de manuseio, colocação, remoção e uso contidas neste guia, bem como os cuidados extras prescritos por seu oftalmologista. Se você não conseguir ou não puder seguir os procedimentos de cuidados recomendados, você não deverá tentar usar lentes de contato.

Quando você adquirir suas lentes pela primeira vez, certifique-se de que consegue colocá-las e retirá-las (ou certifique-se de estar assessorado por outra pessoa que possa retirar as lentes para você adequadamente).

Etapa 1: Como começar

É essencial que você aprenda e tenha boa higiene no cuidado e no manuseio de suas novas lentes.

A limpeza é o primeiro e mais importante aspecto no cuidado apropriado das lentes de contato. Em particular suas mãos devem estar limpas, secas e sem qualquer resíduo de sabonetes, loções ou cremes, antes de você manipular as lentes.

Antes de começar:

- Sempre lave bem as mãos com um sabonete neutro, enxágue-as totalmente e seque-as com uma toalha sem fiapos antes de tocar nas lentes.

Não toque nas lentes de contato com seus dedos ou mãos caso não estejam completamente limpos, pois podem ocorrer arranhões microscópicos nas lentes, causando visão borrada e/ou lesões nos olhos.

- Evite usar sabonetes contendo creme hidratante, loções ou cosméticos oleosos antes de manipular as lentes. Essas substâncias podem entrar em contato com as lentes e interferir no sucesso de sua utilização.

NÃO aplique cosméticos, loções, sabonetes, cremes, desodorantes ou *sprays* nos olhos ou em suas lentes. É melhor colocar as lentes antes de se maquiar. Cosméticos à base d'água têm menor probabilidade de danificar as lentes do que produtos à base de óleo.

Comece corretamente com o hábito de sempre fazer a higiene adequada para que isso se torne algo automático.

Etapa 2: Abrindo a embalagem

Caixa

Cada *caixa* contém lentes embaladas individualmente (*blisters*). Cada lente é fornecida em sua própria embalagem desenvolvida especificamente para mantê-la esterilizada. Você pode escolher manter as lentes dentro do *caixa* para armazenamento até estar pronto para usá-las.

Embalagem da lente

Para abrir uma embalagem individual da lente (*blister*), siga estas simples etapas:

NÃO use se a embalagem estéril estiver rompida ou danificada.

1. Agite a embalagem e verifique se a lente está flutuando na solução.
2. Retire o lacre laminado para ter acesso à lente. Ao estabilizar a embalagem da lente em um local plano, você minimizará a possibilidade de um derramamento da solução.
3. Coloque um dedo na lente (não a toque com a unha) e deslize-a para fora do compartimento da embalagem até que a lente esteja fora dele.

NUNCA use pinças ou outros equipamentos para retirar as lentes de seu compartimento, exceto se especificamente indicado para esse uso.

Ocasionalmente, uma lente poderá se fixar na superfície interna do lacre laminado quando aberto ou no próprio plástico da embalagem. Isso não afetará a esterilidade da lente. Ela ainda estará perfeitamente segura para uso. Remova a lente cuidadosamente e a inspecione seguindo as instruções de manuseio.

Dicas para o manuseio das lentes

- Manuseie suas lentes com os dedos e tenha cuidado para evitar o contato com as unhas. É interessante manter suas unhas curtas e lixadas.

NÃO toque na lente com suas unhas.

- Desenvolva o hábito de sempre manusear a mesma lente primeiro para evitar misturá-las.
- Depois de ter retirado a lente da embalagem, examine-a para se certificar de que está umedecida, limpa e sem qualquer picote ou rasgo. NÃO use a lente se houver algum indício de dano. Use a próxima lente da caixa.

SEMPRE manuseie as lentes com cuidado e evite deixá-las cair

Etapa 3: Colocando as lentes nos olhos

Lembre de sempre iniciar pelo mesmo olho.

Assim que você abrir a embalagem da lente, removê-la e examiná-la, siga estas etapas para colocar a lente no olho:

1. **CERTIFIQUE-SE DE QUE A LENTE NÃO ESTEJA COM SUA POSIÇÃO INVERTIDA**, seguindo um destes procedimentos:
 - Coloque a lente na ponta de seu dedo indicador e verifique-a. A lente deve ter um formato natural, curvo, redondo. Se as bordas da lente tendem a apontar para fora, a lente está invertida.
 - Outro método é pressionar levemente a lente entre o polegar e o indicador. As bordas devem virar para dentro. Se a lente estiver invertida, as bordas virarão ligeiramente para fora.
2. Com a lente em seu indicador, use a outra mão para segurar a pálpebra superior para que você não pisque.
3. Puxe para baixo sua pálpebra inferior, usando os outros dedos da mão com a lente.
4. Olhe para cima e coloque a lente suavemente na parte branca inferior do olho.
5. Solte a pálpebra devagar e feche o olho por alguns instantes.
6. Pisque várias vezes para centralizar a lente.
7. Use a mesma técnica ao inserir a lente no outro olho.

Há outros métodos para a colocação de lentes. Se o método acima for difícil para você, pergunte ao seu oftalmologista sobre um método alternativo.

Etapa 4: Como verificar se suas lentes estão bem colocadas

Depois de ter inserido suas lentes com êxito, pergunte-se:

- Eu enxergo bem?
- Como sinto as lentes nos meus olhos?
- Meus olhos aparentam estar bem?

Se depois de colocar as lentes, sua visão estiver embaçada, verifique o seguinte:

- As lentes não estão centralizadas nos olhos (consulte “*Etapa 5: Como centralizar as lentes*”, a seguir nesta instrução de uso).
- Se a lente estiver centralizada, retire-a (consulte “Como retirar suas lentes”) e verifique os seguintes pontos:
 - Cosméticos ou óleo na lente. Descarte a lente e insira uma nova lente.
 - A lente está no olho errado.
 - A lente está invertida (também não está confortável como deveria estar). Consulte a “Etapa 3: Colocando as lentes nos olhos”.

Se você detectar que sua visão ainda está embaçada depois de verificar as possibilidades acima, remova ambas as lentes e procure seu oftalmologista.

Observação: Se uma lente estiver notavelmente desconfortável ao colocá-la ou se tornar desconfortável logo depois de inserida, retire a lente imediatamente e entre em contato com seu oftalmologista. Se seu autoexame ocular e das lentes mostrar quaisquer outros problemas, **REMOVA IMEDIATAMENTE AS LENTES E ENTRE EM CONTATO COM SEU OFTALMOLOGISTA.**

Etapa 5: Como centralizar as lentes

Uma lente, posicionada na córnea (centro do olho), muito raramente se move para a parte branca do olho durante o uso. No entanto, isso pode ocorrer se os procedimentos de colocação e de retirada não forem realizados adequadamente. Para centralizar uma lente, siga um destes procedimentos:

- Feche suas pálpebras e massageie levemente a lente até o lugar, através das pálpebras fechadas.

OU

- Mova a lente descentrada delicadamente até a córnea (centro do olho) enquanto o olho está aberto, usando a borda palpebral superior ou a inferior para mover a lente para a posição correta.

USO DE LENTES

Ao usar lentes, lembre-se das seguintes precauções importantes:

Lentes Cosméticas e Sintomas Visuais

- Lentes de contato pintadas para uso cosmético podem deixar passar menos luz que as lentes não-cosméticas. Portanto, você pode experimentar alguns sintomas visuais enquanto as estiver usando (por exemplo, perceber o padrão colorido da lente na sua visão periférica).

Condições de risco

- Se você usar produtos com aerossol (*spray*), como *spray* de cabelo, ao usar lentes, mantenha os olhos fechados até o *spray* se dissolver no ar.
- Evite se expor a qualquer vapor nocivo ou irritante, bem como fumaça, ao usar lentes.

Atividade na água

- Não exponha suas lentes de contato à água enquanto as estiver usando.

Como lubrificar/aplicar soluções

- Seu oftalmologista pode recomendar uma solução lubrificante/umectante apropriada para umedecer (lubrificar) as lentes, quando você as estiver usando.
- **Não use saliva** ou qualquer outra coisa que não seja a solução recomendada para lubrificar suas lentes. Não coloque as lentes na boca.
- **Nunca** lave as lentes com água. Há dois motivos importantes para isso:
 1. A água contém muitas impurezas que podem contaminar ou danificar suas lentes e podem levar à infecção ou lesão no olho.
 2. Você pode perder sua lente no ralo.

Lentes fixas (sem movimento)

- Para a saúde de seus olhos, é importante que as lentes se movimentem livremente neles.
- Se a lente se fixar (parar de se movimentar) no olho, aplique algumas gotas da solução recomendada para lubrificação. Aguarde até que a lente comece a se movimentar

livremente no olho antes de removê-la. Se a ausência de movimentação das lentes continuar, você deve consultar imediatamente seu oftalmologista.

Compartilhamento de lentes

- **Nunca** compartilhe suas lentes com outra pessoa. Elas foram prescritas para seus olhos e para corrigir sua visão conforme o grau necessário. Compartilhar lentes aumenta muito a chance de infecções nos olhos.

Adesão ao cronograma de substituição e de uso prescritos

- **Nunca** use suas lentes além do tempo indicado nas instruções de uso do produto ou sem os cuidados extras recomendados pelo seu oftalmologista.
- **Sempre descarte** lentes usadas conforme indicado nas instruções de uso e de acordo com os cuidados extras prescritos por seu oftalmologista.

REMOVENDO AS SUAS LENTES

CUIDADO: Sempre se certifique de que a lente está na córnea (no centro de seu olho) antes de tentar removê-la. Confirme isso cobrindo o outro olho. Se a visão estiver embaçada, a lente está na parte branca do olho ou não está no olho. Para localizar a lente, inspecione a área superior do olho, olhando, no espelho, para baixo, enquanto levanta a pálpebra superior. Em seguida, inspecione a área inferior, puxando a pálpebra inferior para baixo.

Sempre remova a mesma lente primeiro.

1. Lave, enxágue e seque totalmente suas mãos.
2. Há dois métodos recomendados de remoção da lente: o método de pinçamento e o método de uso dos dedos indicador e polegar. Você deve seguir o método recomendado por seu oftalmologista.

Método de pinçamento:

Etapa 1. Olhe para cima, deslize a lente para a parte inferior do olho usando o dedo indicador.

Etapa 2. Pince levemente as lentes entre o polegar e o indicador.

Etapa 3. Remova a lente.

Método com o polegar e o indicador:

Etapa 1. Coloque sua mão ou uma toalha sob o olho, para pegar a lente.

Etapa 2. Coloque o indicador no centro da pálpebra superior e o polegar no centro da pálpebra inferior.

Etapa 3. Pressione e force uma piscada. A lente deverá cair em sua mão ou na toalha.

Observação: A lente poderá sair, mas continuar na pálpebra, no dedo indicador ou no polegar.

3. Remova a outra lente seguindo o mesmo procedimento.

Lembre-se de que não é necessário limpeza ou desinfecção de suas lentes de contato quando elas forem prescritas para uso único e descarte diário, como neste caso, pois elas deverão ser sempre descartadas quando forem retiradas. Tenha lentes de reposição ou óculos à mão.

Observação: Se esses métodos de retirada das lentes forem difíceis para você, solicite ao seu oftalmologista outro método alternativo,

EMERGÊNCIAS

Se qualquer substância química (produtos domésticos, soluções de jardinagem, produtos químicos de laboratório, etc.) respingar sobre seus olhos: **LAVE OS OLHOS IMEDIATAMENTE COM ÁGUA CORRENTE E CONTATE RAPIDAMENTE SEU MÉDICO OFTALMOLOGISTA OU ENCAMINHE-SE A UM PRONTO-SOCORRO O MAIS RÁPIDO.**

INSTRUÇÕES PARA O USUÁRIO COM PRESBIOPIA (MONOVISÃO)

Sobre correção de monovisão e presbiopia



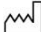







A presbiopia é uma condição na qual as lentes naturais nos olhos perdem parte de sua elasticidade. Isso ocorre normalmente com a idade, pois as lentes perdem parte de sua capacidade de mudar o foco para diferentes distâncias (perda de visão para leitura).

- A monovisão é um método de correção para presbiopia, usando lentes de contato, no qual um olho é corrigido para visão de longe e o outro é corrigido para visão de perto.

A decisão de adaptação através do método de monovisão deve ser feita pelo oftalmologista que o acompanha, conjuntamente com você, após cuidadosamente considerarem e discutirem sobre suas necessidades.

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Os seguintes símbolos podem aparecer no rótulo ou na embalagem:

	Consulte as instruções de uso
	Fabricado por ou em
	Data da fabricação
	Use até a data (data de expiração)
	Código de lote
	A esterilização é realizada por vapor ou calor seco
DIA	Diâmetro
BC	Curva-base
D	Dioptria (potência da lente)
	Símbolo de certificação do sistema de qualidade
	Bloqueio UV
	Taxa paga para descarte de resíduos (requisito europeu)
	ALERTA:As leis federais dos Estados Unidos da América restringem a venda deste dispositivo apenas por profissionais da saúde ocular licenciados ou mediante prescrição deles.
A	ACCENT STYLE
N	NATURAL SHINE™
S_H	NATURAL SHIMMER™
S_P	NATURAL SPARKLE™
V	VIVID STYLE

IMPORTANTE: Se você tiver dificuldades em usar suas lentes ou se não compreender as instruções fornecidas, NÃO ESPERE até a próxima consulta. ENTRE EM CONTATO COM SEU OFTALMOLOGISTA IMEDIATAMENTE E/OU COM A JOHNSON & JOHNSON VISION CARE.

0059-PIG-01